



### Specifiche del prodotto

Codice	Descrizione	Confezione
REF_1KR	Dispositivo monouso sterile per posizionamento protesi mammarie in gel di silicone	5 unità

### Istruzioni per tagliare l'imbuto

Rotonde lisce	Rotonde testurizzate
Moderato e Moderato plus – seguire indicazioni sul dispositivo	Moderato e Moderato plus – sommare 1,5 cm
Alto profilo: sommare 0,5 cm	Alto profilo: sommare 2 cm
Profilo ultra alto: sommare 1 cm	Profilo ultra alto: sommare 2 cm

Protesi anatomiche: sommare 2 cm

# Deliver the dream

## No-Bowl & No-Touch Technique

# EZ Fan

Dispositivo monouso, sterile, per il posizionamento delle protesi mammarie in gel di silicone



**KIMS  
MED**

www.kimsmed.com

CE 2195

Distributore esclusivo per l'Italia

**VEDISE Hospital**  
Improving Life

www.vedise.it

REV. 03/2020



## Che cos'è "EZ Fan" ?

EZ Fan è stato concepito appositamente per soddisfare le esigenze dei chirurghi in cerca di una valida alternativa alle metodiche tradizionali di inserimento manuale delle protesi; prevede una tecnica di inserimento a basso attrito per l'impianto di protesi mammarie, pettorali, di polpaccio, di gluteo, in gel di silicone. Consente di ridurre al minimo il contatto della protesi mammaria con il tessuto circostante e con il sito di incisione, garantendo un inserimento più agevole.

## Qual è l'indicazione per "EZ Fan" ?

È indicato per il posizionamento di una protesi in gel di silicone sterile nella tasca, al fine di ridurre al minimo il contatto con le mani, con i tessuti circostanti e con il sito di incisione, garantendo un inserimento più agevole.

## Quali sono i vantaggi di "EZ Fan" ?

- Incisione ridotta
- Aumenta le opzioni di posizionamento
- Riduce i tempi operatori
- Riduce la pressione applicata sull'involucro della protesi, quindi anche l'occorrenza di danni accidentali
- È indicato per tutte le protesi in silicone
- Meno frizione, maggiore scivolamento dell'impianto
- Superiore visualizzazione dell'impianto
- Tecnica *Minimal-Touch*

## Come si usa "EZ Fan" ?



### IDRATARE

#### IDRATARE L'IMBUTO

Iniettare soluzione salina nell'imbuto dell'EZ Fan con una siringa e chiudere l'estremità superiore con una mano. Ruotare l'imbuto per idratarlo completamente tenendo chiusa anche l'estremità inferiore. Eliminare la soluzione salina dall'imbuto EZ Fan.



### CARICARE

#### CARICARE L'IMBUTO



A questo punto si può caricare la protesi in gel di silicone nell'imbuto idratato. Le protesi rotonde vengono inserite nell'imbuto direttamente dall'imballaggio, con quella che viene chiamata tecnica *No-Touch*. In caso di impianti anatomici, il chirurgo li inserisce a mano nell'imbuto, per garantire una corretta direzione ed orientamento dell'impianto prima dell'inserimento nella tasca chirurgica. Si tratta in questo caso di una tecnica *Minimal-Touch*.

### TAGLIARE

#### TAGLIARE L'IMBUTO



Tagliare la punta dell'imbuto per adattarlo a dimensione, tipo e forma della protesi in gel di silicone.

##### Istruzioni per tagliare l'imbuto

Rotonde lisce	Rotonde testurizzate
Moderato e Moderato plus – seguire indicazioni sul dispositivo	Moderato e Moderato plus – sommare 1,5 cm
Alto profilo: sommare 0,5 cm	Alto profilo: sommare 2 cm
Profilo ultra alto: sommare 1 cm	Profilo ultra alto: sommare 2 cm
<b>Protesi anatomiche: sommare 2 cm</b>	

### SPINGERE

#### SPINGERE LA PROTESI NELL'IMBUTO



Spingere delicatamente l'impianto attraverso l'imbuto nella tasca chirurgica.

